

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

Slyngelektrod för gynekologi (110 mm skaft)

Slyngelektrod med slyngtråd i volfram för slyngdiatermikonisering. Elektroden ger exakt dissektion med minimal koagulationsnekros och "nativa" vävnadskoner. Elektroden är färgkodade, har Y-skaft för bättre sikt, reglerbar inställning av snittdjupet med SAFE-T-Gauge. Rekommenderad inställning är ren Cut eller Blend 1 och 60 watt.* Använd lägst möjliga uteffekt för önskat resultat. Anpassa uteffekten till elektrodens storlek, vävnadens beskaffenhet och snitthastigheten.

Art nr	Färg	Bredd	Djup	Skaft längd	Fattning dia	Antal/förp
DLP-S11	Gul	10	10	110	2,4	10
DLP-M11	Grön	15	12	110	2,4	10
DLP-W11	Vit	20	12	110	2,4	10
DLP-L11	Blå	20	15	110	2,4	10
DLP-B11	Beige	25	8	110	2,4	10
DLP-E11	Ljusedgul	25	22	110	2,4	10
DLP-SQ1	Orange	10	10	110	2,4	10
DLP-SQ2	Brun	10	4	110	2,4	10
DLP-T11	Violet	5	5	110	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Kulelektrod för gynekologi (110 mm skaft)

Rekommenderad inställning för kulelektrod är Coag och 60 watt uteffekt.* För användning med andra generatorer, se tillverkarens rekommendation. För kulelektroden "med penseldrag" 1-2 mm och koagulera den blödande vävnaden i sårhålan.

* Rekommenderad inställning gäller vid användning med Utah Medical Products Inc.s elektrokirurgiska generator Finesse (ESU-220 el FIN-220). För användning med andra generatorer, se tillverkarens rekommendation.

Art nr	Färg	Kul diameter	Skaft längd	Fattning dia	Antal/förp
DBL-311	Svart	3	110	2,4	10
DBL-511	Röd	5	110	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Material

	Slyngelektrod	Kulelektrod
Slyngtråd	Volfram 0,2 mm	-
Kula	-	Rostfritt stål
Skaft	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Isolering	Polypropylen	Polyolefin

Observera

- Volframtråden får inte vridas/böjas.
- Undvik direkt kontakt med metall.
- Använd isolerade kirurgiska instrument.
- Rengör endast med fuktad gasväv.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

CORTEC MEDICAL AB
Mercuriiparken 2, 211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50
kundservice@cortec.com, www.cortec.com
Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.