

## SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

### Slyngelektrod för dermatologi (55 mm skaft)

Slyngelektroden används för excision av externa lesioner. Elektroden skär med en volframtråd som är endast 0,2 mm i diameter och har hög värmeledningsförmåga och hållfasthet. Detta ger exakt dissektion med minimal koagulationsnekros. Samtliga modeller är färgkodade. Ställ in generatoren på CUT eller BLEND 1 vid den uteffekt (ca 60 watt) som operatören bedömer som optimal.\*

Uteffekten anpassas till elektrodens storlek, vävnadens beskaffenhet och snitthastigheten.

Art nr	Färg	Bredd	Djup	Skaft	Fattn dia	Antal/förp
DLP-S05	Gul	10	10	55	2,4	10
DLP-M05	Grön	15	12	55	2,4	10
DLP-B05	Beige	25	8	55	2,4	10
DLP-T05	Violett	5	5	55	2,4	10
DLP-SQ3	Rosa	10	4	55	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

### Nålelektrod för dermatologi (55 mm skaft)

Nålelektrod nål i volfram för punktdiatermi. Använd lägst möjliga uteffekt för önskat resultat och anpassa uteffekten till vävnadens beskaffenhet och typ av ingrepp.

Art nr	Färg	Nåldiameter	Nållängd	Skaft	Fattn dia	Antal/förp
DLP-N05	Röd	0,8	5	55	2,4	10
DLP-U05	Svart	0,2	5	55	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

### Kulelektrod för dermatologi (55 mm skaft)

Använd kulelektrod för koagulation med ca 60 watt uteffekt.\* För kulelektroden ”med penseldrag” 1-2 mm över den blödande vävnaden.

Art nr	Färg	Diameter	Skaft	Fattn dia	Antal/förp
DBL-505	Röd	5	55	2,4	10

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

\* Rekommenderad inställning gäller vid användning med Utah Medical Products Inc.s elektrokirurgiska generator Finesse (ESU-220 el FIN-220). För användning med andra generatorer, se tillverkarens rekommendation.

### Material

	Slyngelektrod	Kulelektrod	Nålelektrod
Kula	Volfram 0,2 mm	-	-
Nål	-	Rostfritt stål	-
Skaft	-	-	Volfram
Isolering	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
	Polypropylen	Polyolefin	Polyolefin

### Observera

- Volframtråden/nålen får inte vridas/böjas.
- Direkt kontakt med oisolerade instrument i metall kan skada volframtråden/nålen.
- Rengör med fuktad gasväv. Använd aldrig slipmedel.
- Max uteffekt 150 watt.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

**CORTEC MEDICAL AB**  
Mercuriiparken 2, 211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50  
[kundservice@cortec.com](mailto:kundservice@cortec.com), [www.cortec.com](http://www.cortec.com)  
Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.