

# ANVÄNDARINSTRUKTION

## Umbili-cath® steril navelkateter för neonatalpatienter (silikon)

Silikonkateter för administration via naveln för neonatalpatienter. Katetern har en rundad ändpunkt med två utloppshål vilket underlättar vätskeflödet. Katetern är graderad i 1 cm intervall och är röntgentät. Katetern är tillverkad i silikon och kan användas kontinuerligt i 30 dagar.

Umbili-cath kateter med enkel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran.

Umbili-cath kateter med dubbel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran samt en anslutning med injektionsmembran.

Umbili-cath navelkateter tillverkas i **silikon** som är ett modernt och avancerat material med följande egenskaper:

- extra mjukt och elastiskt
- biokompatibelt, vidhäftar ej / irriterar inte vävnaden
- minskar risken för infektion och är ej trombogent
- är hydrofobt och behöver inte vätas före användning
- innehåller ej mjukgörare som kan frigöras under behandlingen
- har hög stabilitet och bibehåller elasticiteten under lång tid
- kan användas lång tid utan byte

Art nr	Beskrivning	French	Material 1)	Längd 2)	Antal/förp.	Kateter YD	Kateter ID	Katetervolym
4173505	Navelkateter enkel lumen	3,5	Silikon	34 cm	10 st	1,16 mm	0,51 mm	0,15 ml
4175005	Navelkateter enkel lumen	5,0	Silikon	34 cm	10 st	1,67 mm	0,84 mm	0,25 ml
4273505	Navelkateter dubbel lumen	3,5	Silikon	34 cm	5 st	1,16 mm	0,60 mm	0,15 ml
4275005	Navelkateter dubbel lumen	5,0	Silikon	34 cm	5 st	1,67 mm	0,69 mm	0,25 ml

YD = ytterdiameter, ID = innerdiameter

1) Anslutningen mellan kateter och kran är tillverkad i silikon. Kranen är tillverkad i polykarbonat.

2) Kateterns längd räknas från ändpunkten till anslutningen.

## FÖLJ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ADMINISTRATION AV NAVELKATETER

### OBSERVERA

- Katetrarna är mjuka och känsliga för skada.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionstryck.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Katetern får ej omsteriliseras eller återanvändas.

**CORTEC MEDICAL AB**

Mercuriparken 2

211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50

kundservice@cortec.com, [www.cortec.com](http://www.cortec.com)

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.